



es

ORINAL MASCULINO Y CUÑA

Para la recogida de fluidos biológicos humanos (heces y orina). Limpiar y desinfectar antes de su uso. Sin esterilizar.
El producto no está fabricado con látex de goma natural o goma natural seca.
Producto sanitario.

Finalidad prevista:

Tanto la cuña como el orinal masculino tienen como finalidad la recogida de orina y/o heces en pacientes encamados o con movilidad reducida.

Destinados al uso hospitalario y/o domiciliario.

Estos productos no son aptos para cualquier otra aplicación que no sea la definida anteriormente.

Composición:

La cuña sanitaria está fabricada en polipropileno y colorante blanco.

El orinal masculino está fabricado en polietileno de alta densidad.

Limpieza y desinfección:

Limpiar con detergente y desinfectar con lejía u otros desinfectantes, antes de cada uso. Tanto la cuña como el orinal son aptos para su uso en lavadoras desinfectadoras.

Vida útil:

La vida útil del orinal y de la cuña viene determinada por el desgaste y deterioro debidos al uso. Desechar cuando se detecten cambios de color, asperezas, deformaciones, etc.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz del sol.

Glosario de símbolos:



Número de catálogo



Número de lote



Fecha de caducidad



Producto Sanitario



Cantidad



Marcado CE



Manténgase fuera de la luz del sol



Consulte las instrucciones de uso en eifu.enfa.es



Fabricante



Identificador único de dispositivo

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a ENVASES FARMACÉUTICAS, S. A. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.



ENVASES FARMACÉUTICAS, S.A.

C/ Paralela, 15.

28860 Paracuellos de Jarama, Madrid. España/Spain.

info@enfa.es - www.enfa.es

FECHA REVISIÓN: 2024/07

TEC176/1